

# M463 ショルダーサポート ライト

(左右両肩兼用)

プロテクションレベル2 ミドルサポート

## 肩を手軽に保温・圧迫サポート

### サイズ測定位置:胸囲

S	78 ~ 86cm
M	86 ~ 94cm
L	94 ~ 104cm



脇の下の真下と胸の中心を通る周計(最も太い位置)を計測してください。



マクダビッドの  
肩用サポーター  
一覧はこちらから  
[www.mcdaavid.co.jp](http://www.mcdaavid.co.jp)



**ご使用上の注意** 安全にご使用いただく為に必ずお読みください。また、本書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

マクダビッドサポーターは、痛みを取ったり、治療効果をもたらすものではありません。また、傷害を完全に予防することはできません。傷害の予防には、筋力や柔軟性を十分に高めておくことが大切です。


次のような場合は使用しないでください。

- 傷・湿疹などお肌に異常がある方は使用しないでください。
- 皮膚炎・ゴムに対するアレルギーのある方は使用しないでください。
- 使用中、使用後に皮膚に異常があらわれたときは使用を中止し、医師へご相談ください。

※長時間連続でご使用されると皮膚に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

**装着方法** 以下の装着手順は右肩の場合です。左肩に装着する場合も同じように装着してください。

素肌に直接装着するか、又はアンダーウェアの上から装着してください。

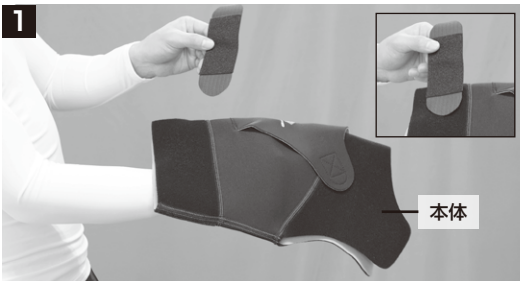

装着する前に腕ストラップを本体腕部に仮止めする。



胸ストラップの片方の端(マジック部)を本体背中部につける。



本体に腕を通し、胸ストラップを背中側から胸の前へ回して本体胸部にとめる。



コンプレッションパネルを好みの圧迫力が得られる強さで引っ張ってとめる。



腕ストラップで上腕部のフィット感を調節する。



〈装着完了〉  
必要に応じて全体の  
フィット感を調節する。

**お手入れ方法** 汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。

**取扱い方法**

**素材** 合成ゴム、ナイロン、ポリウレタン

●やむをえない事情により、製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ユナイテッドスポーツプランズジャパン株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-19-3 五反田第一生命ビル9F  
Tel 03-5436-6606 Email [comm@unitedspb.jp](mailto:comm@unitedspb.jp)

URL [www.mcdaavid.co.jp](http://www.mcdaavid.co.jp)

MD19F